


お薬取出機 バラし錠ずトルネ スタートガイド

DAIICHO 大同化工株式会社


① PTP 排出ガイドを取り付ける

拡大

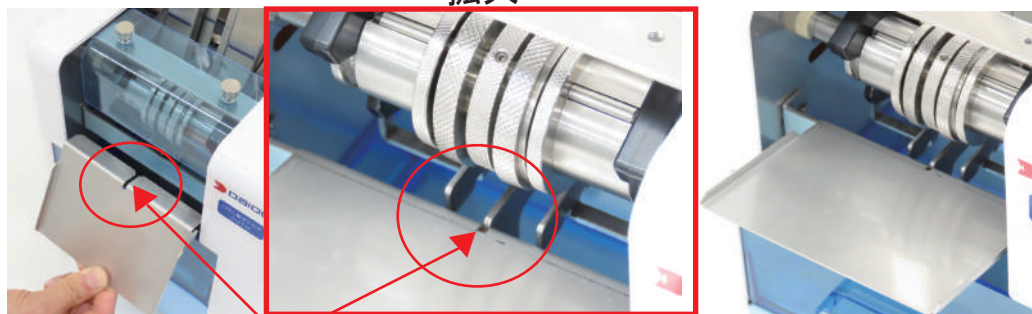


切れ込みに合わせながら、PTP 排出ガイドを取り付けます

② PTP シートをセットする

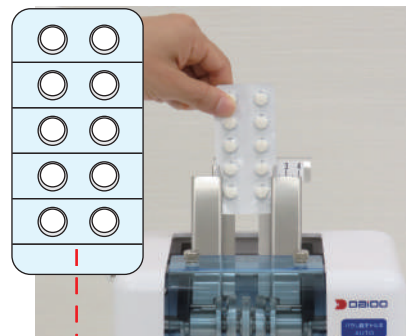

耳がある長い方が下

③ PTP シート幅調整

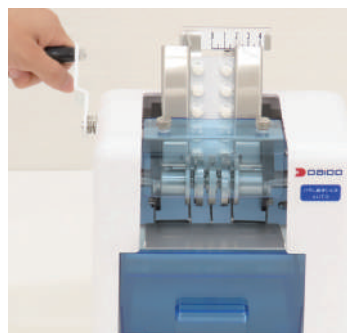

PTP 幅調整ハンドルを回し
PTP ガイドを調整します
錠剤を軽く挟む状態まで PTP ガイドを狭め
ハンドルを 45 度戻し PTP シートがスムーズに
投入できるようにします

④ PTP 送りハンドルを回す



PTP 送りハンドルを回す
時計回り 錠剤を取り出す
反時計回り PTP シートが詰まった

⑤ 受皿ケースを引き出す




受皿ケースを引き出し
錠剤を取り出します

※異物がないか必ず確認してください


3 列シートは、2 回機械を通すことによって対応可能です

1 回目

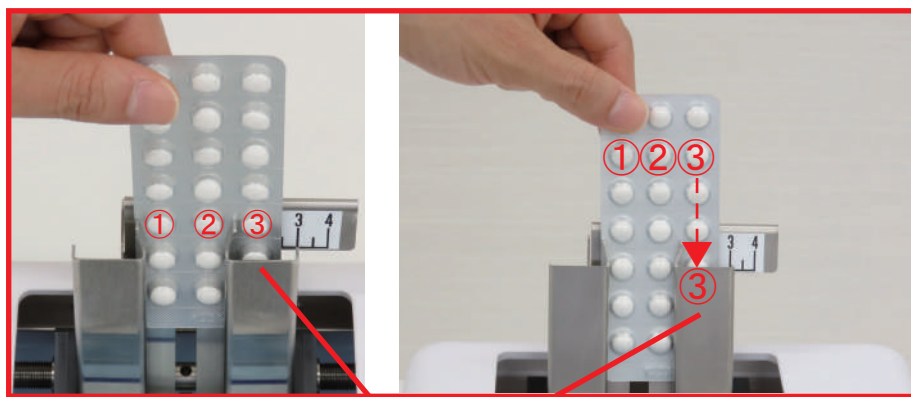

3 列シートの③列目を右 PTP ガイドの空洞に入れセットします
PTP 送りハンドルを回し、①列目②列目の錠剤を取り出します

2 回目

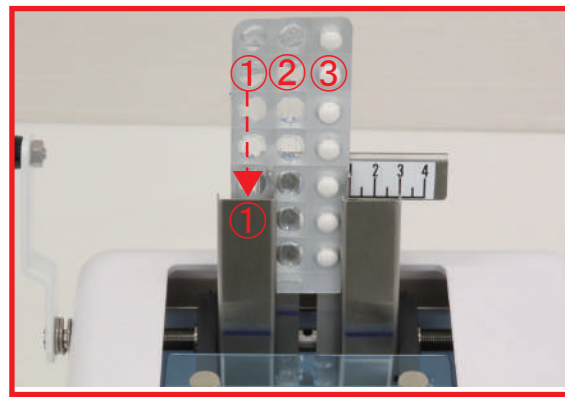

①列目を左 PTP ガイドの空洞に入れセットします
③列目の錠剤を取り出します