


お薬取出機 バラし錠ずトルネAUTO スタートガイド

DAIDO 大同化工株式会社


① PTP 排出ガイドを取り付ける

拡大

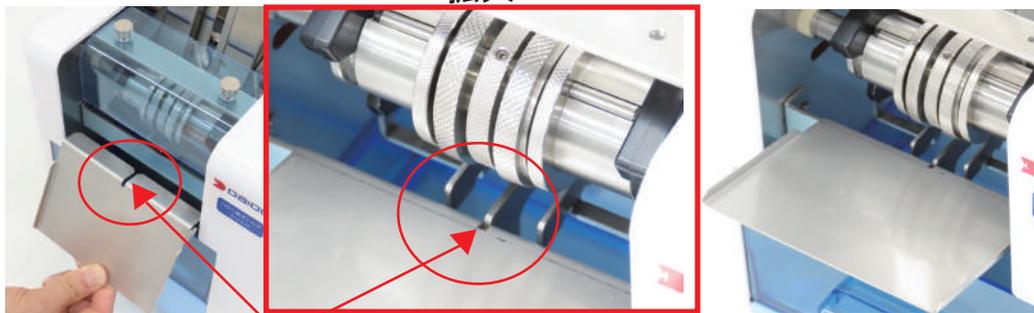

切れ込みに合わせながら、PTP 排出ガイドを取り付けます

② PTPシートをセットする

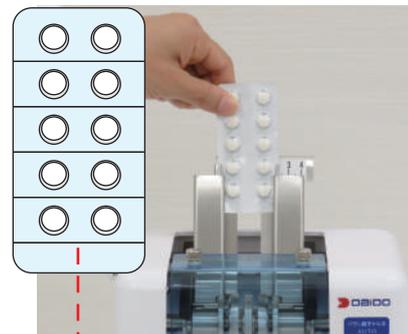

耳がある長い方が下

③ PTPシート幅調整




PTP幅調整ハンドルを回し
PTPガイドを調整します。
錠剤を軽く挟む状態までPTPガイドを狭め
ハンドルを45度戻しPTPシートがスムーズに
投入できるようにします

④ 電源スイッチON→運転



電源スイッチをONにします
運転 錠剤を取り出す場合
逆回転 PTPシートが詰まった場合
(長押し)


⑤ 受皿ケースを引き出す

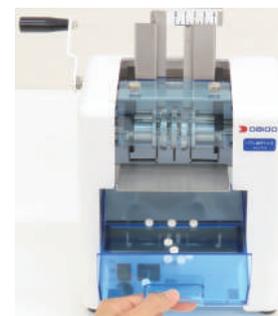

受皿ケースを引き出し
錠剤を取り出します
※異物がないか必ず確認してください


3列シートは、2回機械を通すことによって対応可能です

1回目

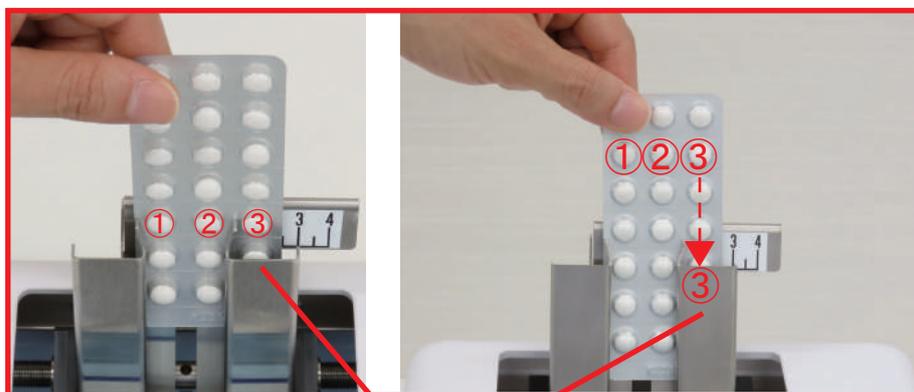

3列シートの③列目を右PTPガイドの空洞に入れセットします
運転スイッチをONにし、①列目②列目の錠剤を取り出します

2回目

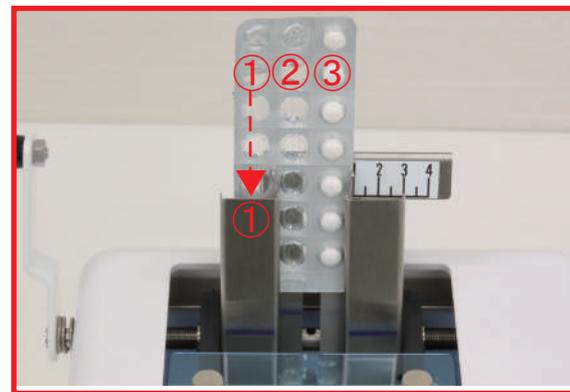

①列目を左PTPガイドの空洞に入れセットします
③列目の錠剤を取り出します